

QMass 8.1

Manuel d'utilisation

Table des matières

1.	Démarrage de QMass.....	1
2.	Espace de travail de QMass	4
3.	Réalisation d'une analyse de la fonction LV.....	5
4.	Effectuer une analyse QStrain.....	7
5.	Effectuer une analyse étendue de la fonction LV.....	7
6.	Analyse T2w.....	8
7.	Analyse DSI.....	11
8.	Analyse T2w-DSI combinés	14
9.	Analyse TSI	15
10.	Analyse T1.....	17
11.	Analyse T2/T2*	20
12.	Terminer une analyse QMass	25
	Précision des mesures	26
	Dépannage	31
	Touches de fonction	32
	Touches de raccourci	33
	Références	37

1. Démarrage de QMass

QMass est démarré à partir de Medis Suite.

 Pour une description détaillée sur le démarrage d'applications et le chargement de données dans les applications, reportez-vous au Démarrage rapide/Manuel d'utilisation de Medis Suite.

En utilisant la fonction Glisser-déplacer, il est possible de charger des données dans QMass. En fonction des touches de modification enfoncées pendant l'activation de la fonction Glisser-déplacer, QMass aura un comportement de charge différent :

Glisser-déplacer	Les données seront ajoutées à la session en cours et la première série sera rendue active.
Glisser-déplacer + Maj	Les données seront ajoutées. La série active actuelle reste active.
Glisser-déplacer + Ctrl	Les données actuelles seront fermées. Les nouvelles données seront chargées. La première série sera activée.

Pour charger des contours locaux existants


- Cliquez sur Menu  et sélectionnez **Fichier > Charger des contours ...**

Sélectionnez le fichier d'analyse de QMass qui vous intéresse.

Pour sélectionner une série

- Si vous avez ouvert plusieurs séries, vous pouvez basculer d'une série à l'autre en cliquant sur leurs onglets sous la Matrice étude.

Déplacez la souris sur un onglet pour afficher une info-bulle indiquant le nom de la série.

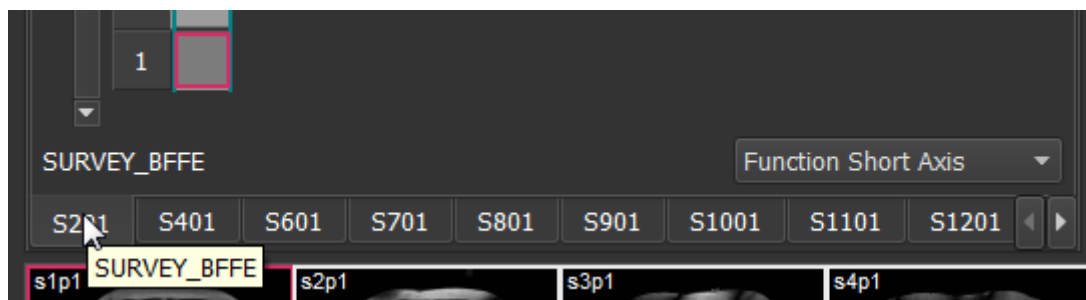

Pour parcourir les images d'une série

- Utilisez les touches fléchées de votre clavier pour faire défiler les images dans la zone d'affichage des miniatures et dans la Vue active.

Pour sélectionner une image

- Cliquez sur une image dans la zone d'affichage des miniatures pour la sélectionner.

Ceci permet d'afficher l'image dans la Vue active.

Dans la zone d'affichage des miniatures, l'image sélectionnée est marquée d'un cadre rouge.

Pour afficher une série dans la fenêtre Film

- Cliquez sur  dans la barre d'outils ou appuyez sur F5.

Pour faire défiler les images de la série dans la fenêtre Film

- Utilisez les touches fléchées de votre clavier.

Pour basculer entre les séries dans la fenêtre Film

- Appuyez sur la touche PgUp (Pg. préc) ou PgDn (Pg. suiv) de votre clavier.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière

- Utilisez le curseur sous la fenêtre d'affichage ou définissez le mode édition sur le mode zoom  et utilisez le BGS.

Pour effectuer un panoramique

- Appuyez sur le bouton central ou la molette de la souris, maintenez-le enfoncé et faites glisser.

Ceci permet de faire un panoramique de l'image.

Pour revenir en mode édition, relâchez le bouton central ou la molette de la souris.

Pour régler la largeur et le niveau de la fenêtre

- Appuyez sur 2 sur le clavier pour optimiser la largeur et le niveau de la fenêtre.

Ou

- Cliquez sur BDS et faites glisser dans la vue active. Déplacez la souris vers la gauche ou la droite pour régler la largeur de la fenêtre, déplacez-la vers le haut ou le bas pour ajuster le niveau de la fenêtre.

Pour charger une série pour une analyse comparative

- Cliquez sur Menu  et sélectionnez **Fichier > Ouvrir sélection séries ...**

Sélectionnez la série qui vous intéresse. Cochez la case Comparaison et chargez les données.

Pour modifier les paramètres de la combinaison automatique

- Cliquez sur Menu  et sélectionnez **Fichier > Ouvrir sélection séries ...**

Activez ou désactivez la case à cocher de la combinaison automatique. En sélectionnant plusieurs séries, il est possible de créer une nouvelle série combinée.


Pour créer un cliché à partir d'un graphique ou d'une fenêtre

- Cliquez sur  dans la barre d'outils de la boîte de dialogue.

2. Espace de travail de QMass

L'espace de travail principal de l'application QMass est constitué d'un ensemble de barres d'outils, d'une matrice d'étude et de trois zones d'affichage. Les icônes actives dans les barres d'outils dépendent du type d'étude analysé et de son orientation.

Les zones d'affichage Lignes scan présentent la position de coupe de la série sélectionnée. Dans les deux premières vues, vous pouvez passer à une autre série en faisant un clic droit et en sélectionnant la nouvelle série. Vous pouvez également effectuer un panoramique et effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des curseurs.

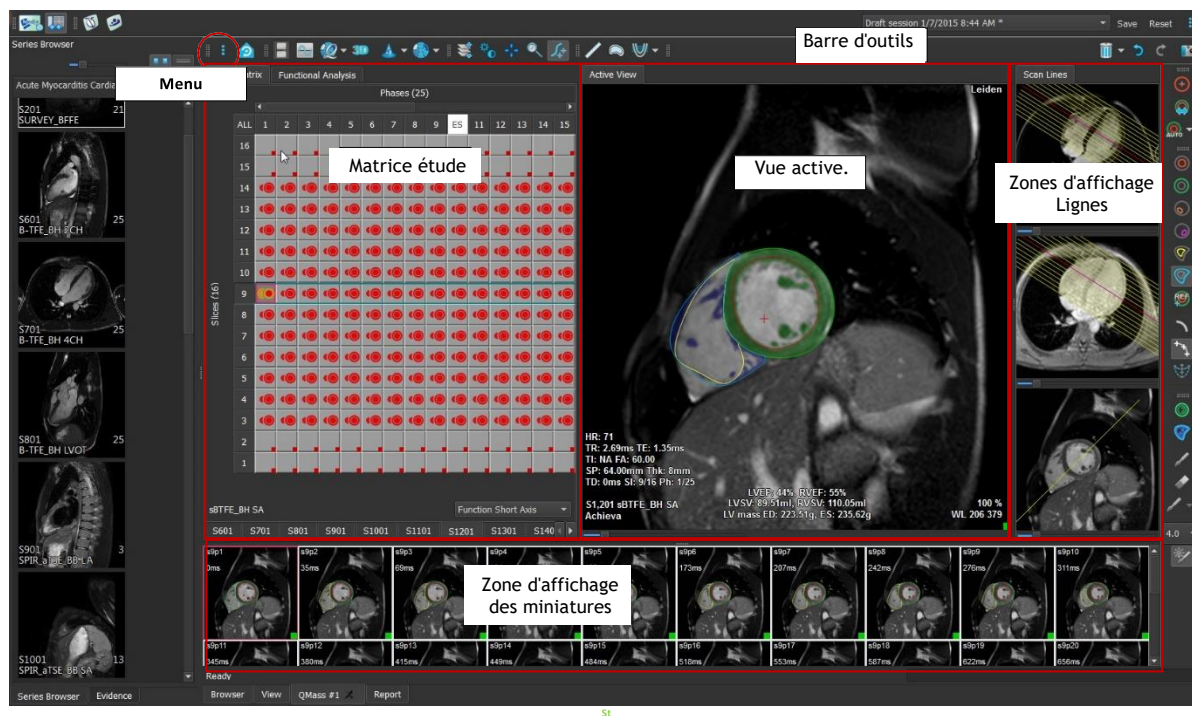

Dans cette présentation rapide, vous apprendrez à connaître les fonctions clés de QMass ainsi que le fonctionnement de base du logiciel. Vous allez ouvrir une étude, l'examiner, effectuer une analyse de la fonction LV, afficher les résultats de l'analyse.

3. Réalisation d'une analyse de la fonction LV

Maintenant que nous avons examiné la série, nous allons effectuer une analyse de la fonction LV à l'aide de l'assistant d'analyse ventriculaire. Il existe plusieurs assistants dans QMass qui fournissent un flux de travail guidé pour vous aider à effectuer une analyse rapidement et facilement.

L'assistant d'analyse ventriculaire comporte quatre étapes :

- sélectionner la série du grand axe et de la série du petit axe et placer des marqueurs de la valve et de l'apex dans la phase ED de la série du grand axe
- placer des marqueurs dans la phase ES de la série du grand axe et sélectionner le type de contours à détecter
- vérifier les contours détectés
- vérification des résultats

 L'assistant d'analyse ventriculaire n'est disponible que si l'étude contient des images ciné à grand axe et à petit axe. Si vous n'avez pas d'images grand axe, vous pouvez toujours effectuer une analyse à l'aide de la fonction de détection automatique standard. Consultez le manuel d'utilisation de QMass pour obtenir des instructions.

 Des contours créés automatiquement et manuellement peuvent entraîner des résultats erronés. Assurez-vous de bien les vérifier et de les corriger si nécessaire.

Pour réaliser une analyse de la fonction LV à l'aide de l'assistant d'analyse ventriculaire.

1. Dans la matrice étude, sélectionnez les onglets des différentes séries et vérifiez pour chaque série si le type d'étude correct est défini.

Si nécessaire, vous pouvez corriger l'étiquetage d'une série en cliquant avec le bouton droit de la souris sur son onglet et en sélectionnant l'étiquette appropriée dans le menu.

2. Sélectionnez **Analyse > Assistant analyse ventriculaire**.

3. Sous **Sélection séries**, dans la liste déroulante **Série LAX**, sélectionnez la série du grand axe que vous souhaitez utiliser comme référence pour spécifier les emplacements de la valve mitrale et de l'apex.

Si vous avez chargé un scan radial de grand axe, vous pouvez sélectionner la coupe de grand axe que vous souhaitez utiliser dans le champ **Coupe LAX**.

Dans la liste déroulante **Série SAX**, sélectionnez la série ciné petit axe que vous souhaitez analyser.

Sous **Phase ED**, vérifiez si la phase présentée en tant que Phase ED LV est correcte.

Dans la Vue active, sélectionnez les marqueurs du grand axe et faites-les glisser aux bons emplacements. Placez le marqueur A sur l'apex et placez les marqueurs B sur les valves mitrales.

Cliquez sur **Suivant**.



4. Sous **Phase ES**, vérifiez la phase. Dans la vue active, placez les marqueurs A et B comme décrit à l'étape précédente.

Sous **Sélection contour**, sélectionnez le type de contours que vous souhaitez détecter dans les images du petit axe.

❗ Si vous souhaitez calculer la vitesse d'éjection max et la vitesse de remplissage max, laissez l'option **Tous** sélectionnée dans la zone **Endo LV**.

Cliquez sur **Suivant**.

5. Une fois la détection automatique des contours terminée, vérifiez les contours détectés. Examinez la Phase ED et la Phase ES en sélectionnant l'icône **Affichage** correspondante.

❗ La précision des résultats d'analyse n'est garantie que si les contours automatiquement détectés sont vérifiés et modifiés, le cas échéant.

💡 Pour une vue d'ensemble de tous les contours détectés, vous pouvez basculer sur l'onglet **Matrice étude**.

Pour modifier un contour, cliquez sur ,  ou sur  puis lancez la modification.

 Pour des instructions détaillées sur la modification, reportez-vous au Manuel d'utilisation de QMass.

Pour basculer entre l'affichage de la phase ED et l'affichage la phase ES dans la zone d'affichage des miniatures, cliquez sur le bouton **Affichage** correspondant dans l'assistant.

Pour modifier la phase ED ou la phase ES et redéterminer automatiquement les contours, sélectionnez le nouveau nombre phase sous **Redéterminer contours** à l'étape 3 de l'assistant, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour exclure ou inclure des images individuelles, cliquez sur le carré vert ou rouge dans le coin inférieur droit de la zone d'affichage des miniatures. Les contours sont alors automatiquement supprimés ou détectés.

Cliquez sur **Suivant**.

6. Pour obtenir les résultats de l'analyse régionale, assurez-vous  est sélectionné, puis cliquez dans la Vue active pour marquer le septum postérieur ou antérieur dans la coupe actuelle. Répétez cela pour les autres coupes que vous analysez.

❗ Si vous placez le point de référence sur le septum antérieur, veillez à modifier au préalable les paramètres d'œil de bœuf, afin que les segments cardiaques soient étiquetés

correctement. Sélectionnez Menu  > **Paramètres** > **Œil de bœuf...** Dans l'onglet **Afficher**, sous **Emplacement point de référence**, sélectionnez **Antérieur** puis cliquez sur **OK**.

7. Cliquez sur  pour afficher les résultats de l'analyse. Cliquez sur  pour afficher les résultats de l'analyse régionale.

Pour enregistrer les contours que vous avez créés, sélectionnez Menu  > **Fichier** > **Enregistrer** dans la barre de menu.

8. Cliquez sur **Terminé** pour fermer l'assistant.

4. Effectuer une analyse QStrain

Maintenant que nous avons les résultats de l'analyse fonctionnelle, nous pouvons lancer une analyse QStrain.

- Cliquez sur  pour lancer l'analyse QStrain.

💡 Toutes les données et tous les contours sont donnés en entrée de l'analyse QStrain.

💡 Les contours ne sont pas strictement nécessaires pour lancer une analyse QStrain.

5. Effectuer une analyse étendue de la fonction LV

La case à cocher MassK (segmentation des muscles sanguins) de l'analyse fonctionnelle offre une méthode alternative pour déterminer les volumes sanguins et musculaires pour l'analyse fonctionnelle, en plus du volume musculaire papillaire.

En utilisant un curseur de seuil, on peut déterminer un seuil qui distingue le sang du muscle dans les deux chambres ventriculaire droite et gauche. Le seuil peut être copié vers d'autres coupes ou phases.

Pour effectuer une analyse fonctionnelle en mode MassK


1. Sélectionnez l'onglet **Analyse fonctionnelle** et cochez la case **MassK**.
2. Dessinez les contours épocardiques dans toutes les coupes et phases.
3. Dessinez les contours endocardiques s'il faut distinguer entre le volume papillaire et le volume du myocarde.
4. Faites glisser le curseur des seuils LV ou RV pour modifier la classification des muscles sanguins.
5. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils, « **Modifier tissu papillaire LV** » pour ajouter ou supprimer manuellement du tissu musculaire.
6. Afficher les résultats dans le graphique de volume de l'onglet **Analyse fonctionnelle**

Ou


Le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

⚠ Le mode MassK dépend des contours épocardiques. Vérifiez toujours que tous les contours épocardiques sont disponibles et corrects.

⚠ Si tous les résultats dérivés (fraction d'éjection, volume éjecté, débit cardiaque) sont nuls, vérifiez si tous les contours EPI sont disponibles.

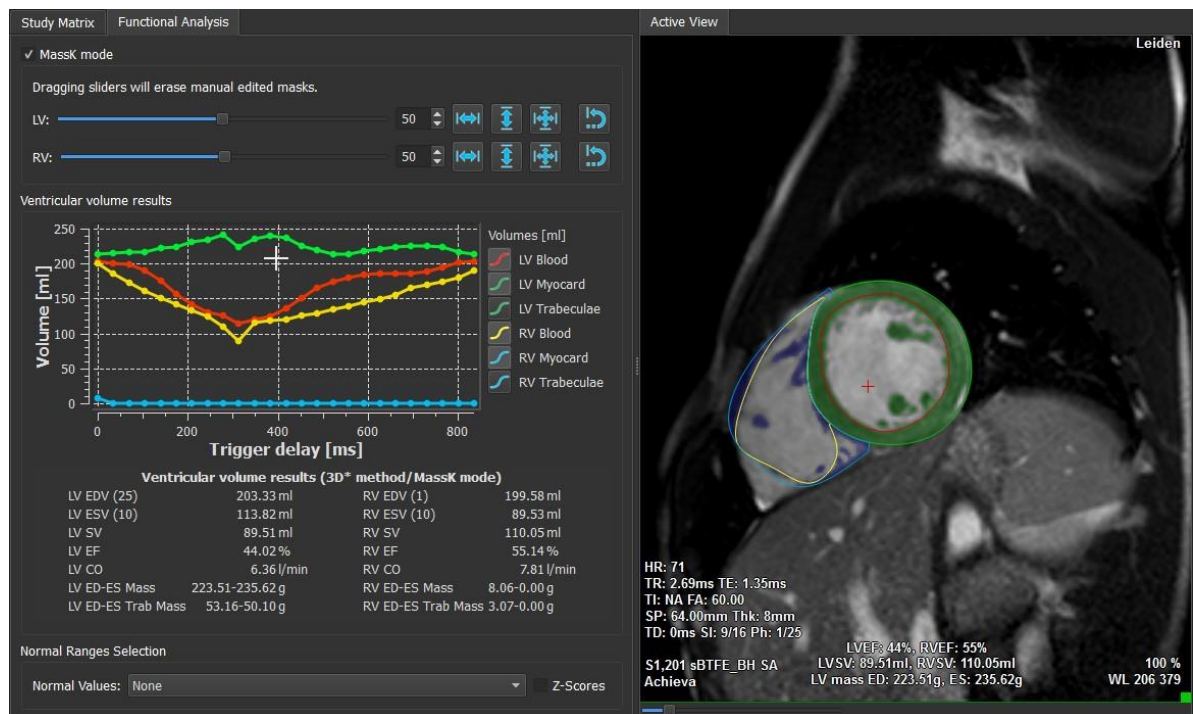

Vous pouvez ajouter une plage normale et un score Z aux résultats ou au rapport. QMass sélectionne automatiquement un ensemble de plages normales en fonction du sexe du patient, de l'âge et de l'intensité du champ magnétique du scanner ou vous pouvez choisir un autre ensemble de valeurs normales dans le volet d'analyse fonctionnelle :

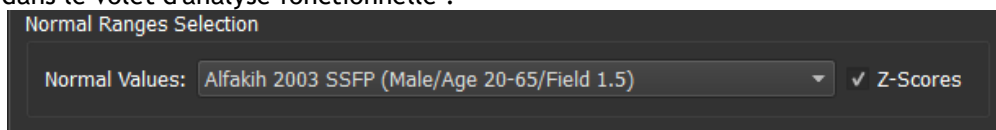

Pour ajouter des scores Z au rapport texte, cochez la case ☒ Z-Scores.

Les valeurs normales par défaut sont basées sur les articles suivants : [1,2,3,4,5].

6. Analyse T2w

L'analyse pondérée T2 (T2w) vous aide à déterminer le volume de l'intensité élevée du signal T2w élevé dans le myocarde qui a été largement utilisé dans l'imagerie de l'œdème dans diverses maladies du myocarde.

Ce chapitre explique comment effectuer une analyse à l'aide de l'analyse T2w.

Effectuer une analyse T2w

QMass dispose d'une analyse T2w. Il s'agit d'un simple outil d'analyse d'une page. Il faut :

- Créer des contours endocardiques et épicaudiques LV
- Détecter et vérifier les zones d'intensité élevée ou basse du signal dans le myocarde.
- Vérifier le seuil et la segmentation T2w

Pour effectuer une analyse T2w

- a. Charger un jeu de données T2w dans QMass.



Voir aussi, « Transfert de contours de séries ciné du petit axe. »

- b. Choisissez les séries à analyser.
- c. Démarrez l'**assistant analyse T2w** en appuyant à côté de  et en sélectionnant  assistant analyse T2w.
- d. Dans l'assistant, cliquez sur  et tracez des contours endocardiques LV dans chaque coupe de la série dans la vue active. De même, cliquez sur  pour dessiner des contours épicaudiques LV dans chaque coupe de la série.
- e. Cliquez sur Détecter  et vérifiez si le contour ROI1 est détecté dans la partie de faible intensité du myocarde et si ROI2 est détecté dans la partie de forte intensité de signal du myocarde. Si nécessaire, vous pouvez modifier les contours ou les détecter à nouveau à l'aide du bouton Détecter.
- f. Vérifiez le seuil T2w en examinant la segmentation des intensités élevées dans toutes les coupes. Vous pouvez remplacer le seuil calculé en faisant glisser le curseur sous **Seuil intensité**.

 Voir aussi, « **Transfert de contours de séries ciné du petit axe.** »

 Vous pouvez copier une valeur de seuil définie manuellement sur d'autres coupes en utilisant **Copy to all slice**  (Copier sur tous les numéros de coupe), **Copy to lower slice numbers**  (Copier sur numéros de coupe inférieurs) ou **Copy to higher slice numbers**  (Copier sur numéros de coupe supérieurs).

 Vous pouvez calculer une autre valeur de seuil en fonction de la zone de contour de faible intensité en spécifiant la méthode de calcul de l'**écart type** et en fournissant un écart type.

Cliquez sur  pour dessiner des zones avec des tissus de haute intensité. Pour commencer à effacer les pixels, cliquez sur .

 Vous pouvez masquer les masques en désélectionnant **Menu**  > **Paramètres** > **Principaux param.** > **Afficher** > **masques**.

 Affichez les résultats dans le volet T2w ou dans le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

Pour effectuer une mesure du rapport T2

1. Utilisez l'icône ROI  pour déterminer une zone à l'intérieur de la région du myocarde en traçant le contour correspondant.
2. Utilisez l'icône ROI  pour déterminer le muscle squelettique en traçant le contour correspondant.
3. À partir des deux ROI, les intensités de signal moyenne, minimale et maximale sont

Analyse T2w

calculées et utilisées pour calculer le rapport T2 entre les deux régions définies.



La valeur du rapport T2 peut être consultée sur le panneau de rapport.

Transfert de contours de séries ciné du petit axe

Si des contours sont déjà disponibles dans la série ciné du petit axe, vous pouvez charger la

série et transférer les contours de cette série vers la série T2w en cliquant sur . Le transfert de contours fonctionne mieux si vous créez manuellement des contours dans la phase de la série ciné du petit axe dans laquelle la série T2w a été numérisée.

7. Analyse DSI

Une analyse de l'intensité du signal retardé (analyse DSI) peut vous aider à déterminer la taille de l'infarctus ainsi que l'étendue de la transmuralité de l'infarctus qui semble délimiter un myocarde viable et non viable ainsi que le rétablissement de la fonction après revascularisation.



Pour en savoir plus, voir l'article suivant : Gibbons, Raymond J., et al. "The quantification of infarct size." *Journal of the American College of Cardiology* 44.8 (2004): 1533-1542.

L'assistant comporte quatre étapes :

- créer des contours endocardiques et épicaudiques LV
- vérifier les zones de myocarde sain et hyper-intense
- vérifier le seuil et la segmentation DSI
- placer un point de référence, définir le seuil de transmuralité.

Pour effectuer une analyse DSI

1. Chargez un jeu de données DSI dans QMass.



Voir aussi, « **Détection automatique des contours dans la série DSI.** »

2. Choisissez les séries DSI à analyser.

3. Démarrez l'**Assistant analyse DSI** en appuyant en regard de  et en sélectionnant  **Assistant analyse DSI**.

4. Dans l'assistant, cliquez sur  et tracez des contours endocardiques LV dans chaque

coupe de la série dans la vue active. De même, cliquez sur  pour dessiner des contours épicaudiques LV dans chaque coupe de la série.



Voir aussi, « **Détection automatique des contours dans la série DSI .** »

5. Cliquez sur **Déteeter**  et vérifiez si le contour ROI1 est détecté dans un myocarde sain et si ROI2 est détecté dans un myocarde hyper-intense. Si nécessaire, vous pouvez modifier les contours ou les détecter à nouveau à l'aide du bouton **Déteeter**. Le seuil DSI hyper-accenué est également calculé lorsque le bouton **Déteeter** est enfoncé.



La valeur de seuil calculée est copiée automatiquement dans toutes les autres coupes si l'option **Copie auto** est sélectionnée. Si vous utilisez le bouton **Appliquer** sans sélectionner **Copie auto**, alors les contours ROI et la valeur de seuil sont déterminés uniquement pour la coupe actuelle. Vous pouvez répéter cela pour chaque coupe séparément.

6. Vérifiez le seuil DSI en examinant la segmentation de la taille infarctus dans toutes les coupes. Vous pouvez remplacer le seuil calculé en faisant glisser le curseur sous **Seuil intensité**.

Cliquez sur  et sur  pour dessiner les zones avec hypo-accentuations.

Pour commencer à effacer les pixels, cliquez sur .

 Vous pouvez copier une valeur de seuil définie manuellement sur d'autres coupes en utilisant **Copy to all slice**  (Copier sur ts numéros de coupe), **Copy to lower slice numbers**  (Copier sur numéros de coupe inférieurs) ou **Copy to higher slice numbers**  (Copier sur numéros de coupe supérieurs).

 Vous pouvez calculer une autre valeur de seuil en fonction de la zone de contour sain en spécifiant une méthode de calcul.

 Vous pouvez augmenter la taille de la pointe du pinceau ou de la gomme en augmentant la **Draw size** (taille du tracé).

 Sélectionnez **Smart brush** (pinceau intelligent) ou cliquez sur  dans la barre d'outils si vous souhaitez modifier le masque actuel sans écraser ou effacer les autres masques.

 Vous pouvez masquer les masques en désélectionnant **Display masks** (afficher masques).

7. Définissez un point de référence. Vous pouvez placer un point de référence en cliquant sur  et en définissant un point de référence dans la vue active à l'extrémité inférieure ou antérieure du septum interventriculaire.

 Assurez-vous qu'un point de référence est placé dans chaque coupe que vous analysez.

 Si vous placez le point de référence sur le septum antérieur, veillez à modifier les paramètres d'œil de bœuf, afin que les segments cardiaques soient étiquetés

correctement. Sélectionnez Menu  > **Paramètres** > **Œil de bœuf...** Dans l'onglet **Afficher**, sous **Emplacement point de référence**, sélectionnez **Antérieur**.

 Si vous souhaitez modifier le seuil de transmuralité par défaut de 50 %, vous pouvez modifier le seuil sous **Seuil transmuralité**.

 Vous pouvez cliquer sur  pour ouvrir une fenêtre Œil de bœuf. Vous pouvez également sélectionner le diagramme de votre choix dans la liste déroulante **Afficher**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre pour accéder aux options permettant d'enregistrer le diagramme et de l'ajouter aux Résultats.

 Affichez les résultats dans le volet DSI, dans le volet Résultats ou dans le volet Rapport de Medis Suite.

Détection automatique des contours dans la série DSI

Les contours peuvent être détectés automatiquement dans la série DSI en cliquant .

 Les contours créés automatiquement et manuellement peuvent conduire à des résultats incorrects. Assurez-vous de les examiner et de les corriger si nécessaire.

8. Analyse T2w-DSI combinés

L'analyse T2w-DSI combinés vous aide à déterminer l'indice et la différence entre les résultats de l'analyse T2w et le résultat DSI.

Ce chapitre explique comment effectuer une analyse T2w-DSI.

Effectuer une analyse T2w-DSI

QMass dispose d'une analyse T2w-DSI. Il s'agit d'un simple outil d'analyse. Il faut :

- Charger et créer les contours endocardiques et épocardiques LV dans la série T2w et DSI.
- Effectuer une analyse T2w et DSI sur les ensembles de données respectifs.

Pour effectuer une analyse T2w-DSI

1. Chargez un ensemble de données DSI et T2w dans QMass.
2. Démarrez l'**Assistant analyse T2w-DSI** en appuyant en regard de  et en sélectionnant  **T2w-DSI combinés**.
3. Effectuez une analyse DSI sur l'ensemble de données DSI.
4. Effectuez une analyse T2w sur l'ensemble de données T2w.

 Affichez les résultats dans le volet DSI/T2w et T2w-DSI combinés, ou dans le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

 Dans l'analyse T2w-DSI combinés, le volume T2w élevé est toujours supposé supérieur ou égal au volume du volume d'infarctus. Si le volume de l'infarctus est supérieur au volume T2w élevé, le volume et les calculs seront arrondis à zéro au lieu d'afficher les valeurs négatives.

9. Analyse TSI

Dans QMass, vous pouvez effectuer une analyse de perfusion de premier passage, appelée analyse Intensité de signal Temps (TSI). Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :

- dessiner les contours endocardiques et épocardiques
- placer des points de référence
- enregistrer les contours

Pour dessiner les contours endocardiques et épocardiques

1. Chargez un ensemble de données TSI dans QMass.
2. Choisissez les séries TSI à analyser, puis cliquez sur **OK**.

Si la barre d'outils Intensité de signal Temps avec l'icône  n'apparaît pas, sélectionnez l'onglet Matrice étude et vérifiez si la série est libellée correctement. Vous pouvez le faire en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'onglet Série.

3. Dans la zone d'affichage des miniatures, sélectionnez une image présentant un contraste suffisant dans les ventricules gauche et droit.
4. Par défaut, le mode de dessin est défini sur traçage. Pour dessiner en mode point, cliquez sur .

5. dans la vue active, tracez le contour endocardique puis cliquez sur  et tracez le contour épocardique.

 Assurez-vous d'exclure la cavité sang LV et RV en dessinant les contours endocardiques appropriés, afin d'éviter que son signal de haute intensité n'affecte les résultats.

6. Si vous souhaitez analyser l'intensité du signal au fil du temps dans une région d'intérêt, cliquez sur . Dans la vue active, tracez un contour autour de la région d'intérêt (ROI).

Si vous souhaitez comparer une ou plusieurs ROI, cliquez sur l'une des autres icônes ROI



et tracez le ou les contours correspondants dans la vue active.

Pour placer des points de référence

1. Cliquez sur .
2. Dans la vue active, placez un point de référence sur la jonction inférieure ou antérieure du ventricule droit et du ventricule gauche.

 Si vous placez le point de référence sur le septum antérieur, veillez à modifier au préalable les paramètres d'œil de bœuf, afin que les segments cardiaques soient étiquetés

correctement. Sélectionnez Menu  > Paramètres > Œil de bœuf... Dans l'onglet Afficher, sous Emplacement point de référence, sélectionnez Antérieur puis cliquez sur **OK**.

Pour enregistrer les contours

1. Si vous avez dessiné une ou plusieurs ROI, sélectionnez le ou les éléments de menu

correspondants dans le sous-menu Enregistrement. Cliquez sur la flèche en regard de  puis sélectionnez **Enregistrer contours ROI1** et les autres éléments de menu qui s'appliquent.

2. Cliquez sur .

Cela permet de copier les contours sélectionnés dans les autres images de la coupe et d'effectuer une correction du mouvement de respiration.

 L'enregistrement de contour est effectué en fonction des paramètres d'enregistrement

de contour. Pour accéder à ces paramètres et les modifier, sélectionnez **Menu** , **Paramètres > Param. enregistrement**

3. Vérifiez les contours dans la zone d'affichage des miniatures ou dans l'outil Film pour voir si le positionnement automatique des contours doit être corrigé.

Pour déplacer un ensemble de contours vers une autre position, appuyez sur MAJ+CTRL et faites-le glisser vers sa nouvelle position.

 Ne modifiez **pas** les contours à l'aide des outils de dessin. Si vous souhaitez ajouter de nouvelles ROI après avoir effectué l'enregistrement, veillez à créer les contours de ROI dans l'image dans laquelle vous avez créé les contours initiaux.

Pour afficher les résultats analyse TSI

1. Cliquez sur  pour afficher les résultats d'analyse sur un graphique.
2. Dans la liste déroulante **Afficher**, sélectionnez le graphique **Intensité myo - Temps** or **Intensité ROI - Temps**.

ou

1. Cliquez sur  pour afficher les résultats d'analyse dans un diagramme en œil de bœuf.
2. Dans la liste déroulante **Afficher**, sélectionnez **Analyse IS**.

Une liste déroulante est ajoutée dans la fenêtre de dialogue.

3. Sélectionnez le type de diagramme que vous souhaitez afficher.

 Pour une description détaillée des diagrammes en œil de bœuf, reportez-vous au manuel d'utilisation.

 Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner 'Ajouter cliché aux résultats' pour ajouter le cliché du graphique au rapport en cours.

 Affichez les résultats dans le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

10. Analyse T1

Si vous disposez du module Analyse T1, vous pouvez utiliser QMass pour analyser la durée relaxation T1 d'une région d'intérêt.

Ce chapitre explique comment :

- Effectuer une analyse T1

Une analyse T1 détermine le taux de récupération de la magnétisation d'une région d'intérêt.

Pour effectuer une analyse T1

- Chargez un ensemble de données T1 dans QMass.
- Choisissez les séries T1 à analyser.



Dans la matrice étude, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet Série et vérifiez si la série est étiquetée correctement en tant que série T1. Si nécessaire, vous pouvez changer l'étiquette de la série dans le sous-menu.

- Sélectionnez l'onglet Analyse T1.
- Dans la zone d'affichage des miniatures, sélectionnez une image avec un contraste suffisant.
- Sélectionnez votre outil de dessin préféré et dessinez le contour de l'endocarde.



Assurez-vous d'exclure la cavité LV afin d'éviter que son signal de haute intensité n'affecte les résultats.

- Cliquez sur  et dessinez le contour épicaudique.



Assurez-vous d'exclure la cavité sang RV afin d'éviter que son signal de haute intensité n'affecte les résultats.

- Marquez une ou plusieurs régions d'intérêt dans le septum. Sélectionnez l'icône de la région d'intérêt, par exemple, , et dessinez une région d'intérêt dans le myocarde.



Vous pouvez désélectionner **Copie auto** sous **Contours** pour empêcher la copie des contours des régions d'intérêt vers les autres images.

- L'onglet Analyse T1 affiche maintenant deux courbes par région d'intérêt : la courbe des valeurs mesurées dans la couleur de la région d'intérêt et la courbe ajustée en pointillé.
- La zone Temps [ms] indique maintenant le temps de récupération T1.

💡 Vous pouvez cliquer sur les icônes dans la zone « Temps [ms] » pour afficher ou masquer les différentes régions d'intérêt.

💡 Vous pouvez sélectionner et afficher le calque T1, T1*, ou le calque résiduel en sélectionnant un **Calque** à partir de la liste déroulante.

💡 Vous pouvez sélectionner le type acquisition, Look-Locker (LL) qui affiche les résultats T1*, T1 ou t0 ou Saturation progressive (PS) qui affiche les résultats T1 et t0.

Résultat	Description
T1 (Saturation progressive)	T1 pour les études à saturation progressive correspond à l'équation suivante : $I = A - B \cdot \text{EXP} (-t/T1)$
T1* (Look-Locker)	T1* pour les études Look-Locker correspond à l'équation suivante : $I = A - B \cdot \text{EXP} (-t / T1^*)$
T1 (Look-Locker)	La valeur T1 pour les études Look-Locker correspond à l'équation suivante : $T1 = T1^* \cdot (B / A - 1)$
t0	t0 est le « temps de retour à zéro », c'est-à-dire le moment où l'intensité du signal croise le zéro sur l'axe horizontal. On peut aussi estimer approximativement la valeur t0 à partir du graphique.

Vous pouvez également afficher le taux de récupération par pixel à l'aide du suivi du

curseur de la souris. Cliquez sur , puis passez la souris sur le pixel de l'image. Ceci affiche le taux de récupération du pixel actuellement suivi.

💡 Reportez-vous à l'article suivant pour obtenir des informations sur le mappage T1 dans les études Look-Locker : Daniel R. Messroghli et al, Modified Look-Locker Inversion Recovery (MOLLI) for High-Resolution T1 mapping of the Heart, Magnetic Resonance in Medicine 52: 141-146 (2004).

💡 Affichez les résultats dans le volet T1, le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

Pour définir une plage de couleurs et un paramètre de carte de couleurs

1. Sélectionnez Menu  > Paramètres > Paramètres T1.

Ceci a pour effet d'ouvrir la fenêtre de la boîte de dialogue Paramètres T1.

Sous **Plage couleurs**, choisissez votre plage couleurs de couleurs préférée. Sous **Carte couleurs**, choisissez votre Carte couleurs du calque préférée.

 Vous pouvez spécifier une carte couleurs par défaut dans l'éditeur de fichier de configuration.

Pour exporter les temps de relaxation par coupe vers DICOM

Cliquez sur le bouton  « Ajouter la carte paramétrique aux résultats ».

 Les cartes apparaîtront automatiquement dans la session QMass actuelle et peuvent être sélectionnées dans l'onglet Matrice étude pour une analyse plus approfondie.

 Pour des instructions sur la sélection séries, voir : Démarrage de QMass.

11. Analyse T2/T2*

L'analyse T2/T2* permet de déterminer les temps de relaxation T2/T2*. La quantification du temps de relaxation T2* aide à caractériser la charge en fer du cœur et du foie.

Ce chapitre explique comment :

- effectuer une analyse de la durée de perte T2 ou T2*.

Une analyse de la durée de perte T2 ou T2* comprend deux étapes : vous devez d'abord tracer un contour autour de la région d'intérêt dans le myocarde, puis exclure de la courbe les mesures qui sont biaisées par le bruit de l'IRM.

Pour effectuer une analyse T2 ou T2*

1. Chargez un ensemble de données T2/T2* dans QMass.
2. Choisissez les séries T2/T2* à analyser.
3.  Dans la matrice étude, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet Série et vérifiez si la série est étiquetée correctement en tant que série T2/T2*. Si nécessaire, vous pouvez changer l'étiquette de la série dans le sous-menu.
4. Sélectionnez l'onglet Analyse T2/T2*.
5. Dans la zone d'affichage des miniatures, sélectionnez une image avec un contraste suffisant.
6. Sélectionnez votre outil de dessin préféré et dessinez le contour de l'endocarde.


 Assurez-vous d'exclure la cavité sang LV afin d'éviter que son signal de haute intensité n'affecte les résultats.

7. Cliquez sur  et dessinez le contour épiqueur.

 Assurez-vous d'exclure la cavité sang RV afin d'éviter que son signal de haute intensité n'affecte les résultats.

8. Marquez une ou plusieurs régions d'intérêt dans le septum. Sélectionnez l'icône de la région d'intérêt, par exemple, , et sélectionnez . Cliquez sur le contour épiqueur pour marquer le début du segment septal, puis double-cliquez sur le contour endocardique pour marquer la fin.

Ceci crée la région d'intérêt. Les illustrations suivantes présentent un exemple.

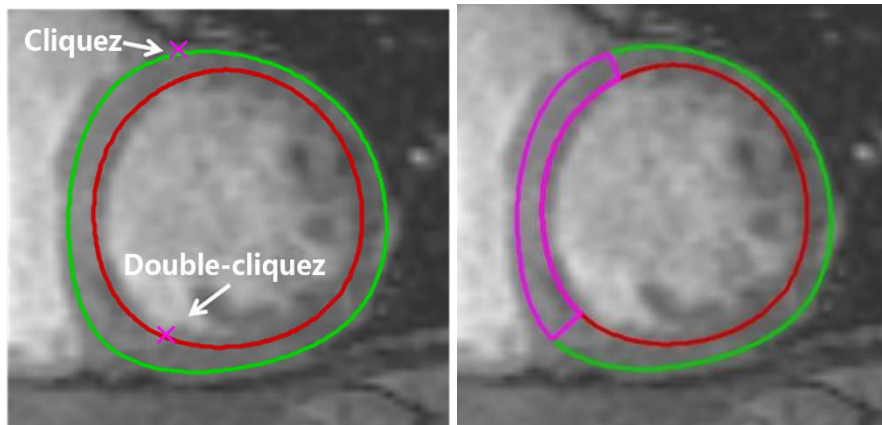

💡 Vous pouvez désélectionner **Copie auto** sous **Contours** pour empêcher la copie des contours des régions d'intérêt vers les autres images.

9. L'onglet Analyse T2/T2* affiche maintenant deux courbes : la courbe des valeurs mesurées dans la couleur de la région d'intérêt, et la courbe ajustée dans une version allégée et semi-transparente de cette couleur.


Pour supprimer les points de mesure qui sont biaisés par le bruit de l'IRM et calculer la valeur T2/T2* correcte de la région d'intérêt, vous devez déplacer le curseur de seuil vers le point où la courbe commence à se stabiliser.

⚠ Si la courbe est inclinée vers le haut au lieu d'être inclinée vers le bas à la fin, veuillez d'abord à exclure les images correspondantes. Pour ce faire, vous devez cliquer sur les carrés verts situés dans le coin inférieur droit des images dans la vue d'affichage des miniatures.

Cliquez sur le triangle blanc situé en bas du diagramme et faites-le glisser vers le haut.

Ceci marque les points sous le curseur comme exclus et fait de la courbe d'ajustement la partie non exclue de la courbe mesurée. S'assurer que la courbe d'ajustement passe par les premiers points mesurés.

L'illustration suivante en est un exemple.

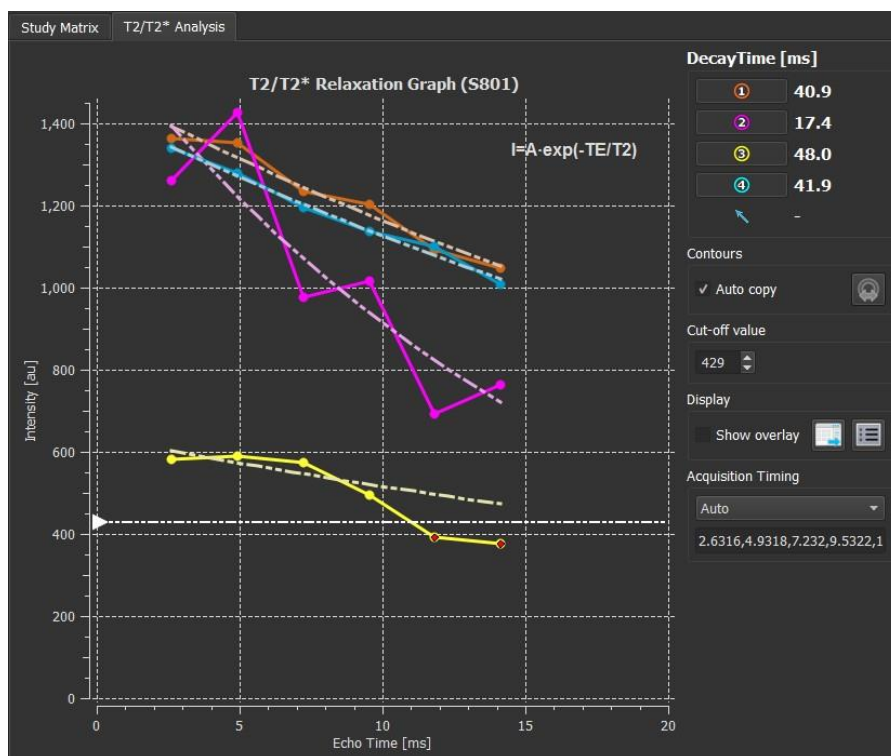

10. Définissez la durée d'acquisition. Choisissez "Auto" pour utiliser la synchronisation dérivée directement du scanner, ou utilisez les synchronisations d'acquisition configurables, telles que "T2Prep_4", si les valeurs ne sont pas disponibles à partir du scanner.



L'éditeur de fichiers de configuration permet de spécifier les valeurs de synchronisation dans la section "Acquisition Timing". T2Prep_4 est un exemple de configuration de synchronisation.



L'utilisation de temps d'acquisition qui ont été configurés peut conduire à des résultats incorrects. Veillez à les vérifier et à les corriger si nécessaire.

11. La zone Durée perte indique maintenant la durée de perte T2 ou T2*.

Utilisez les icônes de la zone Durée perte pour afficher ou masquer les différentes régions d'intérêt.

Vous pouvez afficher un calque de couleurs de la durée de perte en sélectionnant **Afficher calque** sous **Afficher**.

Résultat	Description
T2 ou T2*	Le résultat correspond à l'équation suivante : $I = A \cdot \text{EXP} (-TE / T2)$ où TE est la Durée écho en ms et où T2 désigne T2 pour l'analyse T2 ou T2* pour l'analyse T2*

Vous pouvez également afficher le taux de perte par pixel à l'aide du suivi du curseur de la

souris. Cliquez sur  puis passez la souris sur la région d'intérêt. Ceci affiche le taux de perte du pixel actuellement suivi dans la barre d'état en bas de la fenêtre QMass.

 Affichez les résultats dans le volet T2/T2*, le volet Résultats ou le volet Rapport de Medis Suite.

Pour définir une valeur par défaut pour la valeur de seuil et pour les couleurs de calque

1. Sélectionnez Menu  > Paramètres > Paramètres T2/T2*.

Ceci a pour effet d'ouvrir la fenêtre de la boîte de dialogue Paramètres T2/T2*.

Sous **Carte couleurs**, choisissez votre jeu de couleurs préféré.

Après **Valeur de seuil**, spécifiez la valeur par défaut à utiliser pendant la session actuelle.

 Vous pouvez spécifier une valeur de seuil permanente par défaut dans l'éditeur de fichier de configuration.

Pour définir la durée d'acquisition

1. Sélectionnez la durée d'acquisition.

Sous **Color Map**, choisissez votre schéma de couleurs préféré.

Après **Cut-off value**, indiquez la valeur par défaut à utiliser pendant la session en cours.

 À l'aide de l'éditeur de fichiers de configuration, vous pouvez spécifier les valeurs de synchronisation dans la section Programmation de l'acquisition. T2Prep_4 est un exemple de configuration de synchronisation.

 L'utilisation de temps d'acquisition qui ont été configurés peut conduire à des résultats incorrects. Veuillez à vérifier

Pour exporter les durées perte par coupe vers DICOM

Cliquez sur le bouton  « Ajouter la carte paramétrique aux résultats ».

 Les cartes apparaîtront automatiquement dans la session QMass actuelle et peuvent être sélectionnées dans l'onglet Matrice étude pour une analyse plus approfondie.

 Pour des instructions sur la sélection séries, voir : Démarrage de QMass.

12. Terminer une analyse QMass

Une fois l'analyse terminée, appuyez sur le bouton Enregistrer la session de Medis Suite.



Pour une description détaillée de l'arrêt d'une session de Medis Suite, reportez-vous au Démarrage rapide/Manuel d'utilisation de Medis Suite.

Précision des mesures

Dans QMass, toutes les mesures sont dérivées de calculs effectués sur les images DICOM chargées.

À la fois pendant le développement et à chaque nouvelle version du produit, les mesures et calculs sont rigoureusement validés.

La précision des mesures et des calculs dépasse celle des résultats affichés, d'au moins un chiffre après la virgule.

En pratique, l'image constitue le facteur limitant de la précision des mesures. Des éléments tels que la résolution spatiale et temporelle, le bruit de l'image, l'inhomogénéité du champ magnétique et les caractéristiques du patient déterminent la précision de chaque mesure. Les mesures ont été évaluées à travers plusieurs études de validation. Le tableau suivant présente la précision attendue pour différents types de mesures.

Résultats QMass	Valeur ordinaire	Unité	Précision attendue	Précision	La justification et source de la précision sont applicables
Résultats de volume ventricule gauche et droit					
Aire de surface corporelle	2	m ²	5%	0.01	Précision entièrement dépendante de l'entrée manuelle de l'utilisateur
Nombre de phases ED	2			1	Est précis, tant que les contours sont dessinés correctement
Nombre de phases ES	9			1	Est précis, tant que les contours sont dessinés correctement
Durée phase ED	39.75	ms	25 ms	0.01	Dépend de la fréquence d'acquisition d'échantillons, donné pour un 20 cadres / battement cardiaque, 60 bpm typique
Durée phase ES	272.25	ms	25 ms	0.01	
Volume ED	129.43	ml	5%-10%	0.01	[1] - Dépend fortement du nombre d'acquisition de coupes. Valeur donnée pour 10 coupes typiques
Indice volume ED	64.71	ml/m ²	5%-10%	0.01	- dérivé
Volume ED/HT (HT=taille)	71.9	ml/m	5%-10%	0.01	- dérivé
Volume ES	63.63	ml	5%-10%	0.01	[1] - Dépend fortement du nombre d'acquisition de coupes. Valeur donnée pour 10 coupes typiques

Terminer une analyse QMass

Indice volume ES	31.81	ml/m ²	5%-10%	0.01	- dérivé
Volume systolique	65.8	ml	8%-15%	0.01	Dérivé de la précision de volume ED et ES
Indice volume systolique	32.9	ml/m ²	8%-15%	0.01	- dérivé
Débit cardiaque	4.76	l/min	8%-15%	0.01	Dérivé du débit cardiaque
Indice de débit cardiaque	2.38	l/(m ² *min)	8%-15%	0.01	- dérivé
Fraction d'éjection	50.84	%	8%-15%	0.01	Dérivée du débit cardiaque et du volume ED
Masse LV ED	109.45	g	25%	0.01	Dérivée du volume, toutefois la densité du muscle cardiaque n'est pas une constante [12]
Indice ED masse LV	54.72	g/m ²	25%	0.01	- dérivé
ED/HT masse LV	60.81	g/m	25%	0.01	- dérivé
Masse LV ES	117.88	g	25%	0.01	Voir masse LV ED
Indice ES masse LV	58.94	g/m ²	25%	0.01	- dérivé
Dynamiques d'éjection / de remplissage					
Paramètre	Value				
PER	535.46	ml/s	10%	0.01	Dérivé du volume, limité par la fréquence d'acquisition.
PER/EDV	4.14	EDV/s	10%	0.01	- dérivé
TPER	66.63	ms	25ms	0.01	Dépend de la fréquence d'acquisition d'échantillons, donné pour un 20 cadres / battement cardiaque, 60 bpm typique
Nombre phase TPER	4			1	Est précis, tant que les contours sont dessinés correctement
PFR	325.11	ml/s	10%	0.01	Dérivé du volume, limité par la fréquence d'acquisition.
PFR/EDV	2.51	EDV/s	10%	0.01	- dérivé
TPFR	232.63	ms	25ms	0.01	Dépend de la fréquence d'acquisition d'échantillons, donné pour un 20 cadres /

					battement cardiaque, 60 bpm typique
Numéro de phase TPFR	16			1	Est précis, tant que les contours sont dessinés correctement
Intensité temporelle					
Amplitude	780.7	AU		0.1	Comme il s'agit d'une unité arbitraire, il n'y a pas de précision spécifique
Pente asc Max	364.8	AU/s		0.1	Comme il s'agit d'une unité arbitraire, il n'y a pas de précision spécifique
Temps Pente asc Max	14.6	s	2	0.1	Déterminé par l'intervalle de temps entre les acquisitions. Basé sur une acquisition / 2 secondes typique
Intensité moyenne	1348.8	AU		0.1	Comme il s'agit d'une unité arbitraire, il n'y a pas de précision spécifique
Temps jusqu'à 50% Max	15.7	s	2	0.1	Déterminé par l'intervalle de temps entre les acquisitions. Basé sur une acquisition / 2 secondes typique
Intensité T0	1,020.1	AU		0.1	Comme il s'agit d'une unité arbitraire, il n'y a pas de précision spécifique
Intensité ligne de base	930.6	AU		0.1	Comme il s'agit d'une unité arbitraire, il n'y a pas de précision spécifique
Pente asc relative	58.7	%	2	0.1	[2]
Épaisseur / mouvement de paroi					
Épaisseur de paroi arcs	20.00	mm	5%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types
Mouvement de paroi arcs	10.00	mm	11%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types
Épaississement de paroi arcs	100.00	%	16%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types
Épaisseur de paroi moyenne	20.00	mm	0.1%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types
Mouvement de paroi moyen	10.00	mm	0.1%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types

Épaississement de paroi moyen	100.00	%	0.1%	0.01	[10] - basé sur l'erreur sur 2 écarts-types
Volumes / mouvement de paroi axe long					
Volume ED	110.00	ml	8%	0.01	Typique pour l'approximation de volume d'axe long
Volume ES	50.00	ml	8%	0.01	Typique pour l'approximation de volume d'axe long
Masse ED	120.00	g	25%	0.01	Dérivée du volume, toutefois la densité du muscle cardiaque n'est pas une constante. [12]
Masse ES	55.00	g	25%	0.01	Dérivée du volume, toutefois la densité du muscle cardiaque n'est pas une constante. [12]
Fraction d'éjection	55.00	%	15%	0.01	Basée sur la précision du volume
Volume systolique	60.00	ml	12%	0.01	Basée sur la précision du volume
Épaississement de paroi	100.00	%	0.1%	0.01	Basée sur les calculs de précision de l'axe court
Épaisseur de paroi	20.00	mm	0.1%	0.01	Basée sur les calculs de précision de l'axe court
Segment d'épaisseur de paroi	20.00	mm	0.5%	0.01	Basé sur les calculs de précision de l'axe court et sur la taille de segment
Intensité de signal retardée					
Volume Taille infarctus	39.81	ml	5%	0.01	[5], combiné avec une précision générique [1]
Masse Taille infarctus	41.80	g	10%	0.01	[5], combiné avec une précision générique [1], et [12]
Pourcentage taille infarctus	34.02	%	5%	0.01	[5]
Volume extens. transmurale élevée	32.90	ml	5%	0.01	[5], combiné avec une précision générique [1]
Masse extensibilités. transmuable élevée	34.54	g	10%	0.01	[5], combiné avec une précision générique [1], et [12]
T2*					
Durée relaxation	43.6	ms	5%	0.1	[9]

Terminer une analyse QMass

Fréquence relaxation	22.9	Hz	5%	0.1	Est l'inverse de la durée de relaxation
Charge cardiaque en fer T2 (1.5T)	0.44	mg/g	0.01%	0.01	[13]
Charge hépatique en fer T2 (1.5T)	0.78	mg/g	0.01%	0.01	[13]
Charge cardiaque en fer T2 (3.0T)	0.38	mg/g	0.01%	0.01	[13]
Charge hépatique en fer T2 (3.0T)	0.63	mg/g	0.01%	0.01	[13]
T1/T1*					
Durée perte T1*	1620	ms	5%	1	[11]
Durée perte T1	1560	ms	5%	1	[11]

Références utilisées dans le tableau ci-dessus:

1. Validation Report: MASS LV-Volume and Wall Thickness Quantification, J.J.M. Westenberg, Sep 15, 1999
2. Validation Report: MASS Time-Intensity Analysis, J.J.M. Westenberg, Nov 18, 1999
3. LV-Volume Calculation, MASS 5.0, Validation Report, Eelco van Akker, Jan 8, 2002
4. Time-Intensity Analysis, MASS 5.0, Validation Report, Eelco van Akker, Dec 12, 2001
5. Delayed Signal Intensity validation, Eelco Giele, May 4, 2007
6. Scientific validation report DCE ACD library, Eelco Giele, Dec 30, 2009
7. QMass/QFlow 7.6/5.6 Scientific validation report, Eelco Giele, Oct 1, 2013
8. Scientific validation report: QMassMaskModeSvr.doc, Eelco Giele, Jun 23, 2015
9. Scientific Validation Report T2w Ratio Calculation, E. Giele, Mar 23, 2017
10. Validation Report Wall Thickness / motion / thickening, Eelco van Akker, Dec 13, 2001
11. T1 Measurements update, Eelco Giele, Mar 5, 2015
12. Cardiac left ventricular myocardial tissue density, evaluated by computed tomography and autopsy, Alexandra G. Gheorghe et al., BMC Med Imaging. 2019; 19: 29
13. Scientific Validation Report: T2* to Iron Loading conversion, E. Giele, January 29, 2025

Dépannage

Ajouter des résultats dans Excel

Pour ajouter des résultats dans Excel vous pouvez utiliser le format CSV. Pour avoir des résultats dans Excel, faites ce qui suit :

- Allez au rapport textuel
- Sélectionnez le texte et/ou les tableaux souhaités
- RMB > Sélectionner **Copier CSV**.
- Dans Excel > **Collage spécial** > Sélectionnez **CSV**.

Grille avec des trous

La matrice d'image peut parfois apparaître irrégulière dans le nombre d'images par coupe ou phase, ou il y a des trous dans lesquels des images sont manquantes. C'est causé par les coupes dupliquées dans la série.

- Allez dans l'explorateur du fichier
- Vérifiez que Filtrer doublons soit sélectionné et appuyez sur Scanner à nouveau
- Chargez à nouveau les images
- La matrice d'image doit désormais être belle et régulière.

Pas de résultats d'axe court

Parfois lorsque vous avez une série axe court et une série axe long avec la même description de série le tri et la division de ces séries est erronée. Il en résulte entre autres qu'aucun résultat d'axe court n'est affiché. Afin d'éviter cela, assurez-vous que la série LA et la série SA aient différentes descriptions de série.

Pas de résultats dans le rapport combiné T2w-DSI

Les résultats **combinés T2w-DSI** sont uniquement disponibles lorsque l'assistant **combiné T2w-DSI** est ouvert. Une fois que l'assistant **combiné T2w-DSI** est ouvert, tous les résultats **combinés T2w-DSI** sont disponibles dans les résultats et dans le rapport.

Touches de fonction

Lorsque vous travaillez dans QMass, vous pouvez utiliser les touches de fonction sur votre clavier pour effectuer rapidement les tâches suivantes.

Appuyer sur	Pour
F1	ouvrir l'aide en ligne.
F5	lancer l'outil film et afficher la coupe ou phase actuellement sélectionnée en tant que film.
F6	afficher les propriétés de l'étude.
F7	afficher la fenêtre graphique.
F8	ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez créer des points de mire montrant divers types de résultats d'analyse. Le schéma de segment appliqué dans ces points de mire est le modèle de segment AHA 16.
CTRL+F8	ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez créer des points de mire montrant divers types de résultats d'analyse. Le schéma de segment appliqué dans ces points de mire est segmenté par coupe.
CTRL+SHIFT+F8	ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez créer des points de mire montrant divers types de résultats d'analyse. Le schéma de segment appliqué dans ces points de mire est segmenté par arc.
F9	ouvrir la fenêtre de rapport.
F10	Ouvrir la fenêtre de notation visuelle de mouvement de paroi.
CTRL+F10	Ouvrir la fenêtre de notation visuelle d'intensité du signal temporel.
CTRL+SHIFT+F10	Ouvrir la fenêtre de notation visuelle d'intensité du signal retardée.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci sont des combinaisons de touches sur lesquelles vous pouvez appuyer sur votre clavier pour donner une commande.

Les touches de raccourci suivantes sont applicables à tous les affichages.

Raccourci	Utiliser pour
Études et fichiers de contour	
CTRL+O	ouvrir un explorateur d'étude.
CTRL+F5	rafraîchir l'arborescence du répertoire de l'explorateur.
Images	
+	zoom avant.
-	zoom arrière.
Éléments	
CTRL+D	détecter automatiquement les contours.
CTRL+Z	annuler les actions que vous avez effectuées.
CTRL+Y	refaire les actions que vous avez annulées.
CTRL+C	copier tous les éléments de l'image active dans le presse-papiers.
CTRL+V	coller l'élément actif sur l'image sélectionnée.
CTRL+SHIFT+V	coller tous les éléments sur l'image sélectionnée.
SUPPR	supprimer l'élément actuellement sélectionné.
CTRL+T	transférer les contours de la série du ciné à axe court à la série DSI.
CTRL+R	enregistre les contours créés pour les autres images de la série.
F5	Ouvrir la boîte de dialogue de film
F6	Ouvrir la boîte de dialogue Paramètre de l'étude
F7	Ouvrir la boîte de dialogue Graphique
F8	Ouvrir la boîte de dialogue de point de mire - 16 modèles de segment
Ctrl + F8	Ouvrir la boîte de dialogue de point de mire - segmentée par coupe
Ctrl + Shift + F8	Ouvrir la boîte de dialogue de point de mire - pas de segments.
X	Faire basculer l'inclusion ou l'exclusion des images sélectionnées pour une détection de contour automatique.

Les touches de raccourci suivantes sont applicables à l'affichage actif.

Raccourci	Utiliser pour
Faire glisser en utilisant le bouton du milieu de la souris	image panoramique
Appuyer sur W, puis faire glisser	ajuster la largeur et le niveau de la fenêtre des images. Par défaut, un mouvement horizontal ajuste la largeur de la fenêtre, et un mouvement vertical ajuste le niveau de la fenêtre. Appuyer sur la touche W du clavier pour s'assurer que  soit sélectionné pour activer le mode largeur et niveau de fenêtre.
1	réinitialiser la largeur et le niveau de la fenêtre aux valeurs d'origine.
2	optimiser la largeur et le niveau de la fenêtre.
Cliquer sur le bouton du milieu ou sur la molette de la souris + maintenir	masque les contours de tout patient et les propriétés de l'étude affichés dans l'affichage en cours. Relâcher le bouton du milieu de la souris pour afficher à nouveau les contours.
CTRL+faire glisser	déplacer le contour actif par rapport à l'image dans l'affichage en cours et l'affichage de vignette.
CTRL+SHIFT+faire glisser	déplacer tous les éléments par rapport à l'image dans l'affichage en cours et l'affichage de vignette.
CTRL+SHIFT+ALT +faire glisser	déplacer tous les éléments dans l'intégralité de la pile de coupes par rapport aux images dans l'affichage en cours et l'affichage de vignette.
SHIFT + S	remodèle un contour en supprimant les petites irrégularités.
SHIFT + D	remodèle un contour en supprimant les courbes.
SHIFT + C	remodèle un contour en supprimant toutes les courbes qui pointent vers l'intérieur.
SHIFT + E	remodèle un contour en détectant à nouveau le bord, en utilisant le contour existant comme modèle.
S	ajouter l'image dans l'affichage en cours au rapport.
CTRL+A	Accepter les contours endommagés LV et épi LV.
Espace	faire basculer l'élément actif
CTRL+espace	faire basculer le mode d'édition actif
Page suiv.	Passer à la série suivante

Terminer une analyse QMass

Page préc	Passer à la série précédente
CTRL+Page suiv.	Passer au niveau suivant
CTRL+Page préc	Passer au niveau précédent
Vers le haut	Passer à la coupe de phase SUIVANTE
Vers le bas	Passer à la coupe précédente
Gauche	Passer à la page précédente
Droite	Passer à la page suivante
CTRL+gauche	transposer le contour actuel vers la gauche
CTRL+droite	transposer le contour actuel vers la droite
CTRL+haut	transposer le contour actuel vers le haut
CTRL+bas	transposer le contour actuel vers le bas
CTRL+SHIFT+gauche	transposer tous les contours vers la gauche
CTRL+SHIFT+droite	transposer tous les contours vers la droite
CTRL+SHIFT+haut	transposer tous les contours vers le haut
CTRL+SHIFT+bas	transposer tous les contours vers le bas
[Ou]	Augmenter ou diminuer la taille du pinceau, lorsque vous utilisez DSI, T2w ou l'analyse de mode fonctionnelle MassK.

Les touches de raccourci suivantes sont applicables à la fenêtre de film.

Raccourci	Utiliser pour
Page suiv.	Faire défiler vers la série suivante dans la fenêtre Film.
Page avt	Faire défiler vers la série précédente dans la fenêtre Film.
P	lire le film
S	arrêter le film
vers le haut	afficher la coupe suivante
vers le bas	afficher la coupe précédente
droite	afficher la phase suivante
gauche	afficher la phase précédente
F2	basculer entre la coupe et la boucle de phase

1. Alfakih K, Plein S, Thiele H, Jones T, Ridgway JP, Sivananthan MU. Normal human left and right ventricular dimensions for MRI as assessed by turbo gradient echo and steady-state free precession imaging sequences. *Journal of magnetic resonance imaging : JMRI [Internet]*. 2003 Mar [cited 2013 Mar 21];17(3):323–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12594722>.
2. J P G van der Ven, et al. Multicentre reference values for cardiac magnetic resonance imaging derived ventricular size and function for children aged 0-18 years. *European Heart Journal of Cardiovascular Imaging* 21:102-113 (2020). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31280290/>
3. Nadine Kawel-Boehm, et al. Reference ranges ("normal values") for cardiovascular magnetic resonance (CMR) in adults and children. *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance* 22:87 (2020). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33308262/>.
4. Niek H Prakken, et al. Cardiac MRI reference values for athletes and nonathletes corrected for body surface area, training hours/week and sex. *European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation* 17:198-203 (2010). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20042862/>.
5. Ziqian Xu, et al. Reference Ranges of Ventricular Morphology and Function in Healthy Chinese Adults: A Multicenter 3 T MRI Study. *Journal of Magnetic Resonance Imaging* (2023). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37530736/>.
6. Gibbons, Raymond J., et al. "The quantification of infarct size." *Journal of the American College of Cardiology* 44.8 (2004): 1533-1542.
7. Amano Y, Tachi M, Tani H, Mizuno K, Kobayashi Y, Kumita S. T2-weighted cardiac magnetic resonance imaging of edema in myocardial diseases. *TheScientificWorldJournal [Internet]*. 2012 Jan;2012:194069.
8. Abdel-Aty H, Zagrosek A, Schulz-Menger J, Taylor AJ, Messroghli D, Kumar A, et al. Delayed enhancement and T2-weighted cardiovascular magnetic resonance imaging differentiate acute from chronic myocardial infarction. *Circulation [Internet]*. 2004 May 25;109(20):2411–6.
9. Subha V. Raman, MD, MSEE*, Orlando P. Simonetti, PhD*, Marshall W. Winner III, MD*, Jennifer A. Dickerson, MD*, Xin He, PhD†, Ernest L. Mazzaferri Jr, MD*, and Giuseppe Ambrosio, MD P, *Ohio. Myocardium at Risk and Predicts Worse Outcome in Patients With Non–ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome. *JACC*. 2013;55(22):2480–8.
10. G. S. Tilak, L. Y. Hsu, R. F. Hoyt Jr., A. E. Arai, and A. H. Aletras. In vivo T2-weighted magnetic resonance imaging can accurately determine the ischemic area at risk for 2 day-old nonreperfused myocardial infarction *Investigative Radiology*, vol. 43, no. 1, pp. 7–15, 2008.
11. Friedrich MG, Abdel-Aty H, Taylor A, Schulz-Menger J, Messroghli D, Dietz R. The salvaged area at risk in reperfused acute myocardial infarction as visualized by cardiovascular magnetic resonance. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2008 Apr 22;51(16):1581–7.
12. Hoey ETD, Gulati GS, Ganeshan A, Watkin RW, Simpson H, Sharma S. Cardiovascular MRI for assessment of infectious and inflammatory conditions of the heart. *AJR. Am. J. Roentgenol.* 2011 Jul;197(1):103–12.

13. Abdel-Aty H, Zagrosek A, Schulz-Menger J, Taylor AJ, Messroghli D, Kumar A, et al. Delayed enhancement and T2-weighted cardiovascular magnetic resonance imaging differentiate acute from chronic myocardial infarction. *Circulation [Internet]*. 2004 May 25;109(20):2411–6.
14. Eitel I, Desch S, Fuernau G, Hildebrand L, Gutberlet M, Schuler G, et al. Prognostic significance and determinants of myocardial salvage assessed by cardiovascular magnetic resonance in acute reperfused myocardial infarction. *J. Am. Coll. Cardiol.* ; 2010 Jun 1 ;55(22):2470–9